



Anleitung / Nutzerinfo – Gesichtsschutzschild Nirashield S2 Entsprechend VO (EU) 2016/425 Anhang II, 1.4 und EN 166:2001

Das Gesichtsschutzschild Nirashield S2 wurde zum persönlichen Schutz während der COVID-19 Bedrohung entwickelt. Das Augenschutzprodukt / das Gesichtsschutzschild erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung EU 2016/425.

Verwendungszweck / Anwendungshinweise

- Das Gesichtsschutzschild Nirashield S2 schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben.
- Das Gesichtsschutzschild Nirashield S2 soll medizinische Fachkräfte und Mitarbeiter von Rettungsdiensten und andere Personen, die in die Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus eingebunden, gegen Gefährdungen durch Tröpfcheninfektionen schützen. Somit ist das Gesichtsschutzschild auch für andere Bereiche des öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt geeignet. Das Gesichtsschutzschild bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung, Stöße, Splitter, mechanische Teile und ähnliches.
- Das Gesichtsschutzschild ist kombinierbar mit Schutzbrillen, persönliche korrigierende Brillen und Atemschutzmasken.
- Bügel und Sichtscheibe können mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Eine Wiederverwendung des Tragkörpers (Headband und Verstärkungsbügel) nach Desinfizierung mit Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis liegt im Ermessen des Anwenders. Im medizinischen Bereich ist die Sichtscheibe für einmaligen Gebrauch vorgesehen.
- Unbedenklichkeit: Von den eingesetzten Materialien für das Gesichtsschutzschild ist nicht bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind oder Hautreizungen verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können.
- Gesichtsschutzschilde sollen ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, rissig oder anderweitig beschädigt sind, Änderungen in Form und Farbe zeigen, Chemikalien, Ölen oder Fetten ausgesetzt waren, großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren. Schäden sind für den Endbenutzer möglicherweise nicht sichtbar.

Materialien:

- Kopfband: LD-PE (Low Density Polyethylen)
- Visierverstärkung: LD-PE (Low Density Polyethylen)
- Visier/Sichtscheibe: PET (Polyethylenterephthalat)
- Stirnband: Textilgummi (Polyester und Naturgummi)

GESCHÄFTSFÜHRER

Claudio Sora
Jürgen Rieckert
Marco Fontana

RECHT UND STEUER

USt.-IdNr.: DE 262271724
Registergericht: Mannheim
Handelsregisternummer: HRB 704904

BANKVERBINDUNGEN

Kreissparkasse Esslingen
Sparkasse Pforzheim Calw

K.to:101772505
K.to:8203440

IBAN: DE34611500200101772505
IBAN: DE35666500850008203440

Swift/BIC: ESSLDE66XXX
Swift/BIC: PZHSDE66XXX



Montage



1.Schritt: Zunächst das Visier auf einer Seite in den äußeren Haken des Kopfbands einhängen.



2.Schritt: Das Visier in die mittleren beiden Nasen eindrücken.



3.Schritt: Anschließend das Visier in die letzte äußere Lasche einhängen. Dazu muss das Kopfband, wie in der Darstellung abgebildet, gebogen werden.



4.Schritt: Das Textilgummi auf einer Seite in die Lasche einhängen.
Wichtig: Das Gummi soll unter der Sichtscheibe platziert werden.



5.Schritt: Das Gummi straff ziehen und anschließend die Sichtscheibe zwischen Gummi und Bügel eindrücken.



6.Schritt: Schritt 4 und 5 auf der anderen Bügelseite wiederholen. Das Textilgummi zunächst bei Bedarf auf den Kopfumfang anpassen und einkürzen.



7.Schritt: Das Visier leicht zusammendrücken und den Verstärkungsbügel durch beide unteren Löcher einführen. Die Nase zeigt dabei von der Sichtscheibe weg.



8.Schritt: den Verstärkungsbügel um 180° drehen.



9.Schritt: Durch einen gezielten Druck, rastet die Nase im mittleren Loch ein und sichert damit den Verstärkungsbügel



Hinweise zur Lagerung

Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr nach Herstellungsdatum.

Hinweise zur Entsorgung

Die Gesichtsschutzschild-Komponenten können dem Recyclingzyklus zugeführt werden. Eine Entsorgung von kontaminierten Komponenten obliegt dem Anwender.

Andere Warnhinweise

Das Gesichtsschutzschild Nirashield S2 ist nicht für die folgenden Zwecke geeignet:

- zum Schutz gegen mechanische Einwirkung
- zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art
- gegen Funken, Bestrahlung
- zum Schutz vor ionisierender oder nicht-ionisierender Strahlung
- beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten

Das Gesichtsschutzschild Nirashield S2 kann nur bei ordnungsgemäßer Montage und richtiger Anpassung die bezweckte Sicherheit gewährleisten. Abnehmbare Teile dürfen nicht separat getragen werden.

Trageempfehlungen

Es wird empfohlen, das Nirashield S2 im Kombination mit einem zertifizierten Atemschutz (Mund-Nase-Schutz nach EN 149) zu tragen.

Reinigungsanleitung

Das Augenschutzgerät kann mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Zum Trocknen sollen nur feine, fusselfrei Tücher verwendet werden. Das Produkt ist desinfizierbar mit Mitteln auf Alkoholbasis. Bei Kontaminationen ist das Produkt nach Ermessen des Anwenders zu entsorgen.

Haftungsausschluss

Eingesetzt für den beschriebenen Verwendungszweck erfüllt das Gesichtsschutzschild Nirashield S2 die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Ferner erfüllt es die Anforderungen der europäisch harmonisierten Norm EN 166:2001 (teilweise angewandt). Geprüft und zertifiziert hat dieses Augenschutzprodukt die notifizierte Stelle: ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland (NB 1883).

Das Produkt Nirashield S2 Standard large ist wie folgt gekennzeichnet:

NIRA 13 CE (Hersteller, Optische Klasse, Verwendungsbereich, Flüssigkeiten, CE-Kennzeichnung)

Nicht jede Sichtscheibe ist gekennzeichnet. Die Kennzeichnung, sind auf der Verpackungseinheit zu finden.

Eine Verpackungseinheit umfasst 70 Gesichtsschutzschilder.

Hergestellt und im europäischen Markt in den Verkehr gebracht durch:
Nira KSV GmbH, Pforzheimer Strasse 95, 75417 Mühlacker, Germany.

GESCHÄFTSFÜHRER

Claudio Sora
Jürgen Rieckert
Marco Fontana

RECHT UND STEUER

USt.-IdNr.: DE 262271724
Registergericht: Mannheim
Handelsregisternummer: HRB 704904

BANKVERBINDUNGEN

Kreissparkasse Esslingen
Sparkasse Pforzheim Calw

K.to:101772505
K.to:8203440

IBAN: DE34611500200101772505
IBAN: DE35666500850008203440

Swift/BIC: ESSLDE66XXX
Swift/BIC: PZHSDE66XXX